



**ComfortSystem**  
*- för trygg omvårdnad*

# MONTERINGSANVISNING

## QURIR

### VIKTIGT

**QURIR Fotlyft är utprovad på ComfortSystems sängsortiment .  
Om montering sker på annat fabrikat skall ett godkännande ges av  
berörd sängtillverkare.**

### LEVERANSEN INNEHÅLLER

- 1 QURIR fotlyft
- 2 Vadderad fotkorg
- 3 Lyftband
- 4 Transformator & elektronik monterat med fäste.
- 5 Manöverdosa med sladd




## Montering av fot lyften

- QURIR fotlyft är avsedd för att monteras i tillbehörsfästet som sitter i fotändan av sängen.
- Tag fotlyften och sätt den i tillbehörsfästet på den sida ni önskar att fotlyften ska lyfta ifrån. Eftersom lyften jobbar diagonalt över sängen så blir det på den sidan som brukaren inte sitter på. Se bild.



## Montering av elektronik & transformator

- Elektroniken kan monteras antingen på fotgaveln om dess utförande medger, eller på sängens metallsida (innanför trägrinden).
- Alt 1. Häng elektronikboxen med fästet på gaveln så att den hänger på gavelnsskiva under gavelns överliggare. Se till att sladd dragningen underlättar användande och daglig städning. Sätt i 220 v kontakten i väggens uttag.
- Alt 2. Häng elektronikboxen med fäste på sängens metallsida. Häng boxen på samma sida som fotlyften är monterad för att underlätta användande och sladddragning. Sätt i 220 v kontakten i väggens uttag.
- Stick i manöverdosans kontakt i elektronikboxen. Se till att kontakten monteras så att inte stiften skadas. Nu är fotlyften klar att användas.

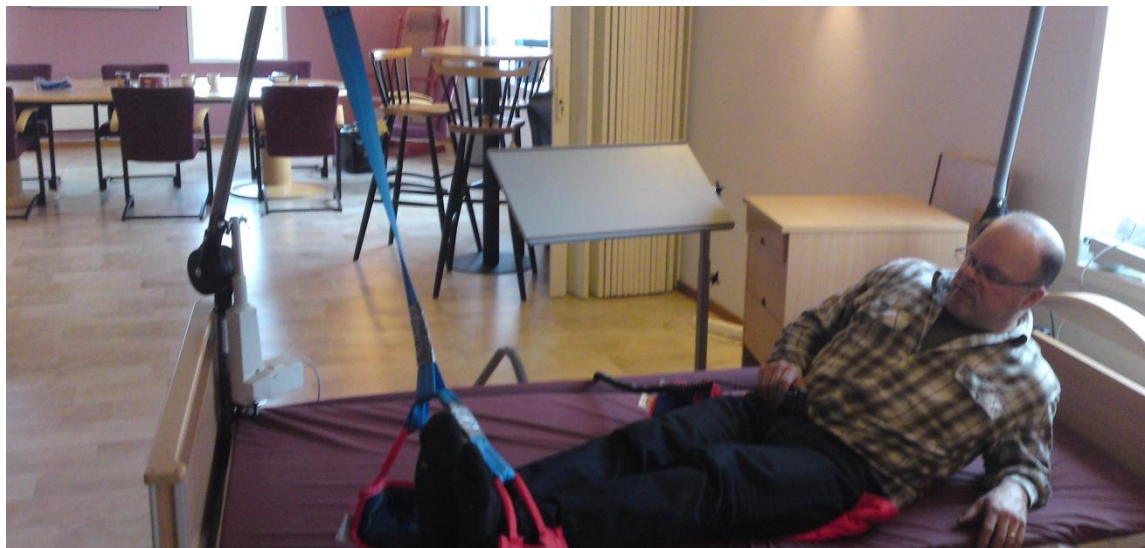

## Montering av fot korg & lyftband

- Tag lyftbandet och trä det igenom fotkorgens båda lyftöglor.
- Fäst nu lyftbandens öglor i kroken på fotlyftens främre lyftrör.
- Se till att banden inte är tvinnande och säkerställ att lyftkrokens låsning har låst banden ordentligt.