


# Monteringsanvisning

# SMART

## Grindförhöjare

1. Sätt ner respektive grinddel i sängens fäste för tillbehör, bild 1 (i sängens hörn). Rör delen med uttag skall sättas neråt.

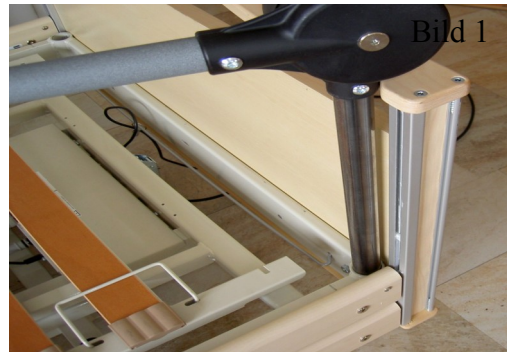

2. Låt röret peka ungefär mot mitten, bild 2. Finn läget där röret åker ner en bit (ca 25 mm). Vrid röret ut till kanten. **OBS** Kontrollera genom att lyfta uppåt att placeringen är rätt. Skall **inte** gå att lyfta ur grinden.



3. Sätt i andra delen likadant. Vrid ut grindförhöjaren så den ligger parallellt med de ordinarie grindarna, bild 3.



# Monteringsanvisning

# SMART

## Grindförhöjare

4. I ena delen finns ett teleskoperat rör. Dra ut detta och stick in i andra delen av grinden tills det tar stopp, bild 4 (har ett automatiskt stoppläge).
5. För frigörning av den teleskoperande delen - frigör röret genom att trycka in den lilla knappen, bild 5, samtidigt som röret skjuts ihop.
6. Fäll respektive grind till helt upprättstående läge när grinden inte används (automatiskt låsläge i uppfällt läge).  
Fäll ner grinden på motsvarande vis - med lite kraft så går grinden över och förbi låsläget.

