



INSTRUKTION

SÄNGTRANSPORTVAGN

Schema för upp- och nervältning av säng på sängvagn

Lägg sängvagnen på sängen och spänn fast vagnen med två spännremmar.

Låt dem löpa över sängbotten och sängvagnens ram samt runt metalllångsidorna - dra åt dem ordentligt.

OBS! Drag EJ remmarna under sängbotten, då låser du lyften.

Rikta sängvagnens nedre hjulpar uppåt samt lås dem.
Se till att du har tillräckligt med utrymme åt det håll du välter sängen.

Höj nu sängen till dess att du har långsidorna i nivå med dina knän.

Tag om sängens långsidor och vält i två etapper.

1. Vält till sängvagnens nedre hjul tar i golvet.
2. Tag ett nytt tag och vält upp på sängvagnens samtliga hjulpar.

För att välta ner säng gör punkt 1 och 2 i omvänd ordning och använd sedan lyften sista biten.

