


# Instruktioner för användare av Comfortsängen

## QIDDY - BED

QIDDY-BED uppfyller kraven enligt nordisk standard för barnsängar,  
och är avsedd för barn upp t.o.m. 12 år.

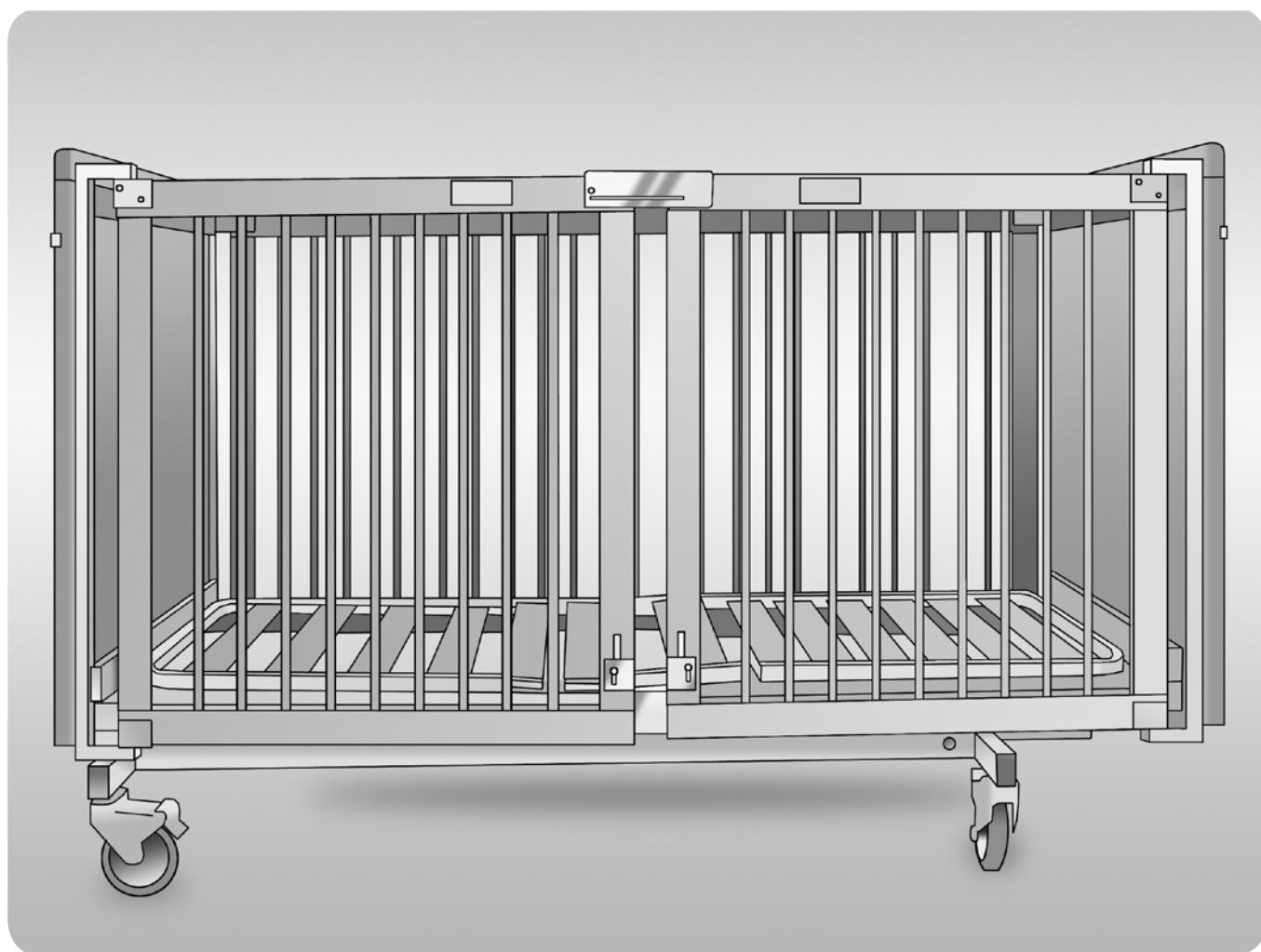


**ComfortSystem**  
- för trygg omvårdnad


# Montering

## 1 Öppna dörr

De öppningsbara dörrarna är försedda med dubbla låsanordningar, en övre och en nedre.

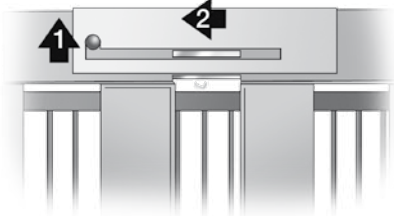

För att öppna det övre låset: lyft beslaget uppåt (1) och åt sidan (2) som pilarna visar.

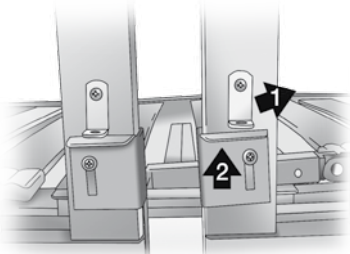

För att öppna det undre låset: Frigör låset genom att föra säkerhetslåset åt sidan (1) och lyft upp låset (2). Öppna dörren.

⚠ En öppen dörr får EJ belastas!


## 2 Stäng dörr

Enligt punkt 1 omvänd ordning. OBS! Kontrollera att låset tar tag ordentligt i sängbotten!


## 3 Fäll ner hel grind

Sängens hela grind är försedd med låsning mot resp gavel.

OBS! För att kunna sänka grinden på ett bra sätt och kunna nå in i sängen, rekommenderas att sängen höjs till rimlig arbetshöjd innan sänkning av grind påbörjas!

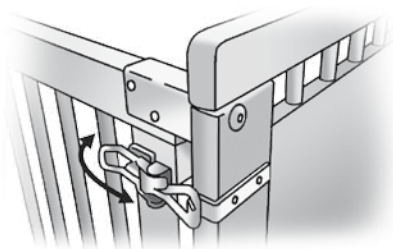

För att frigöra grinden: frigör låsningen på resp sida genom att fälla upp låsklaffen på excenterlåset.

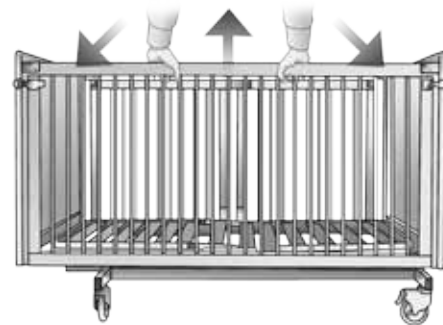

Ställ dig ungefär mitt för grinden, fatta tag i grindens överliggare med ca 1 meter mellan händerna. Lyft grinden rakt upp ca 5 cm så att grinden frigörs från gavlarna. Fäll grindens överkant utåt så att den går fri från upphängningsanordningen. Sänk grinden så parallellt som möjligt!


⚠ Vid sänkning av grind finns klämrisik av fötterna eftersom grinden kan nå ner mot golvet!

## 4 Fäll upp grind

Enligt punkt 3 men i omvänd ordning.

⚠ Kontrollera att grinden sitter stadigt.

## 5 Spärra funktioner

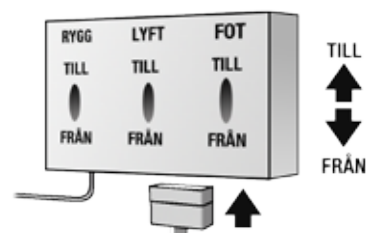


Sängen är utrustad med kontrollbox med vars hjälp man kan stänga av / sätta på sängens funktioner. Monteras på vägg eller på någon av sängens gavlar.

# Bruksanvisning

## 6 Låsning av hjul

Sängen är utrustad med individuellt låsbara hjul. Tryck ner den lilla spärren på resp hjul. Frigör genom att trycka spärren mot sängen.

⚠ *Lås alltid minst två hjul!*

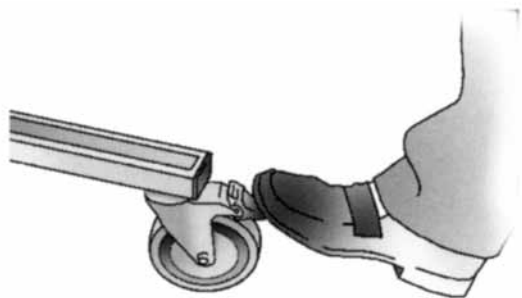


## 7 Demontering elektronikbox


Elektronikboxen är monterad i sänglyften under sängbottens huvudända.

OBS! Boxen får EJ vara ansluten till vägguttaget vid demontering!


Vid montering – gör ovanstående i omvänd ordning.

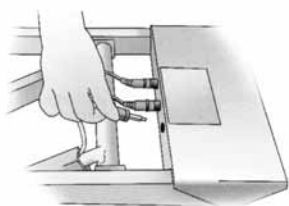


1 Avlägsna motorkontakterna

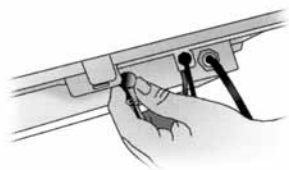

2 Dra ur stickkontakten till handkontrollen

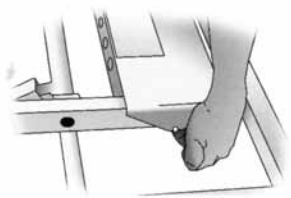

3 På boxens sidor sitter små plastnitar som transportsäkring – ta loss dessa.

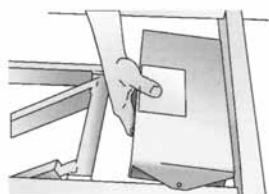

# Bruksanvisning

## 1. Strömförsörjning

Anslut sängens nätkabel till vägguttag.

Sängarna drivs av ett lågvoltssystem (24V). Systemet strömförsörjs via en i styrenheten inbyggd transformator.

⚠ Kontrollera att nätsladden inte ligger i kläm eller fastnar.

## 2. Reglering av sänglyft

Sängen kan höjas/sänkas med hjälp av elektriskt driven motor (lågvolt).

Sänglyften styrs från manöverdonet. Knappar för UPP resp. NER enligt nedanstående skiss.



⚠ Maximal belastning på sängbotten (SWL) 180 kg, varav personvikt = 145 kg

⚠ Kontrollera att sängen har fri plats uppåt när sängen höjs.

⚠ Kontrollera att sängen kan röra sig fritt när den sänks.

⚠ Kontrollera att nätsladd och sladd till manöverdon inte kommer i kläm eller fastnar vid höjning eller sänkning.

⚠ Grindar och dörrar skall vara stängda vid reglering av höjd.

## 3. Reglering av sängryggstöd

Sängryggstödet kan höjas/sänkas med hjälp av elektriskt driven motor (lågvolt).

Sängryggstöd styrs från manöverdonet. Knappar för UPP resp. NER enligt nedanstående skiss.



⚠ Kontrollera att sängryggstödet har fri plats för att kunna fälla uppåt/framåt.

⚠ Kontrollera att ingenting befinner sig bakom/under sängryggstödet när det fälls nedåt/bakåt.

⚠ Kontrollera att inga händer eller fötter sticker ut genom dörrar eller grinden.

## 4. Reglering av ben-del

Ben-delen kan höjas/sänkas manuellt. Höj ben-delen genom att lyfta uppåt i sängbottens bendel.

Ben-delen stannar i önskad höjd med hjälp av sk rasterbeslag. Sänk bendelen genom att först lyfta så högt det går – sänk sedan ner till planläget.

⚠ Kontrollera att bendelen har fri plats för att kunna höjas.

⚠ Kontrollera att ingenting befinner sig under bendelen när den sänks.

# Underhåll/Rekonditionering

Sängen är konstruerad för att kräva minimal skötsel. Beroende på miljö och användningsområde kan dock visst underhåll krävas.

## 1. Normal Rengöring

- Sängbotten och sänglyft rengörs med fuktig trasa. Normalt förekommande rengörings- och desinfektionsmedel kan användas. Sängen kan spolvas med strilande vatten.
- Gavlar och långsida rengörs med fuktig trasa. Normalt förekommande rengörings- och desinfektionsmedel kan användas.

## 2. Högtryckstvätt

Sängar tillverkade efter mars månad 2004 kan även högtryckstvättas.

### ⚠ Innan tvätt:

- Lyft ur elektronikenheten (se Monteringsanvisning)

## 3. Kvartalsvis tillsyn/Rekonditionering

- Kontrollera att nätkabel och kabel till manöverdon är oskadda.


## 4. Årlig tillsyn/Rekonditionering

- Kontrollera att infästningspunkter för samtliga motorer är oskadda och ej har ett onaturligt stort glapp.
- Kontrollera att det ej finns synliga skador på motorer och mekanik.
- Kontrollera att leder och infästningar för rygg och bendel är oskadda och ej har ett onaturligt stort glapp.
- Kontrollera att leder och infästningar för sänglyftens saxdel är oskadd och ej har ett onaturligt stort glapp.
- Kontrollera att sänglyftens hjul är fast åtdragna.
- Efterdra skruvar för gavlar och långsidor.


## 5. Smörjpunkter/Rekonditionering

Sängbottens ledpunkter behöver normalt ej smörjas.

Om sänglyften rengjorts med kraftig spolning eller högtryckstvätt, skall sänglyftens lagerbanor kontrolleras och vid behov smörjas.

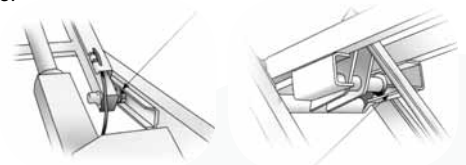

## Felsökningschema

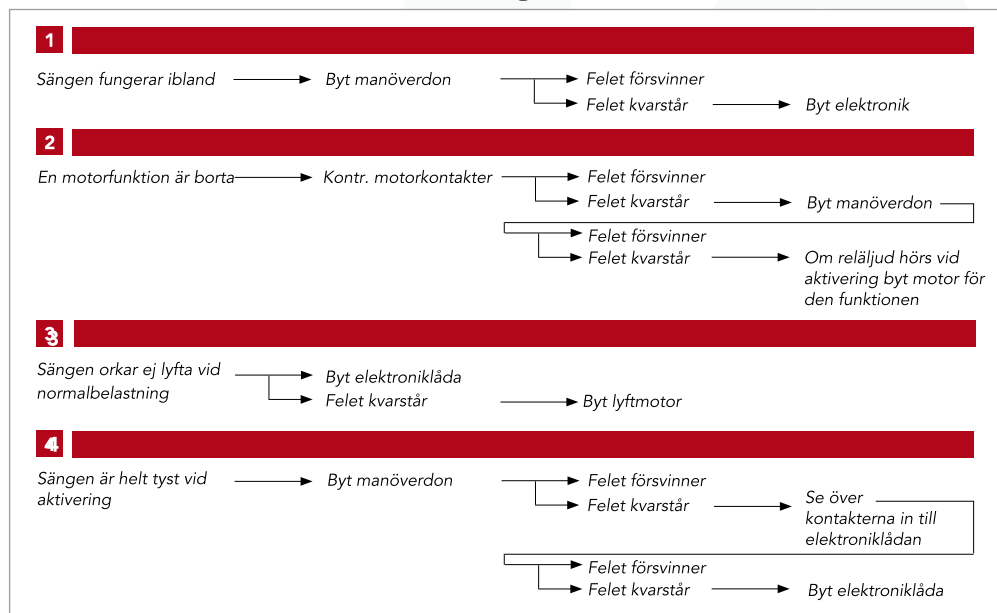

Tillverkare:



**ComfortSystem**  
- för trygg omvårdnad