




Instruktioner för användare av Multi Skötbord

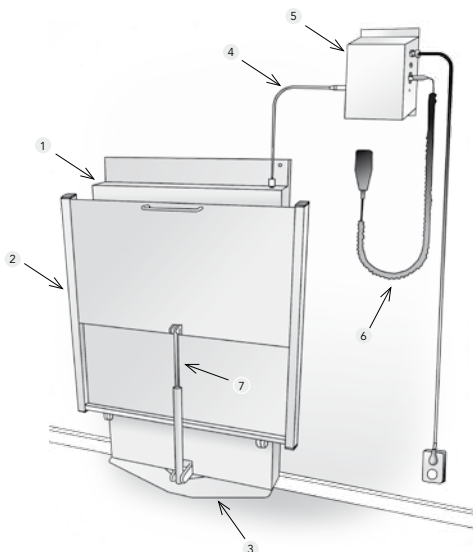

1. Vägghmonterat stativ inkl motor.
2. Fällbar skiva inkl madrass.
3. Klämskydd
4. Styrkabel mellan skötbord och elektronik
5. Elektroniklåda transformator/nätsladd
6. Handkontroll för manövrering upp/ner
7. Gasfjäder

Denna principskiss visar hur
MULTI skötbord skall se ut
efter montering!







Monteringsanvisning

Innan montering

MULTI Skötbord är avsett för montering på vägg.

Kontrollera därför att aktuell vägg klarar den belastning som skötbordet medför och att det finns tvärgående reglar eller motsvarande att skruva bordet i. Om reglar saknas finns en sats med 'Monteringskonsol' som tillhör (art.nr 1190).


Kontrollera också att bordet får plats – se erforderliga mått enligt skiss.

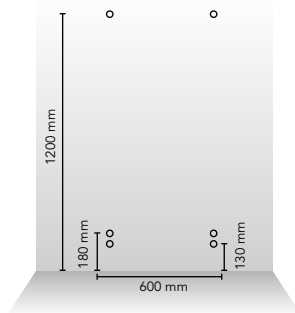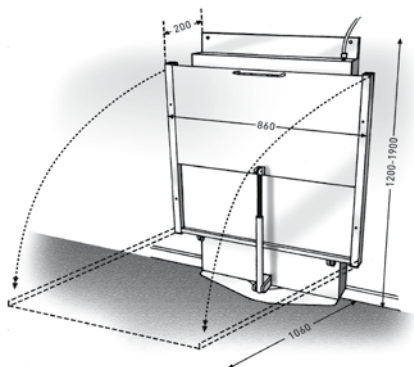

⚠ TÄNK PÅ: Om MULTI Skötbord skall placeras vid en vägg skall måttet mellan vägg och skötbordsskiva vara **mindre än 6 mm** eller **större än 100 mm!**

⚠ TÄNK PÅ: Om MULTI Skötbord skall placeras vid en tvättbänk eller liknande, skall bänken vara helt täckt mot skötbordet för att förhindra att ben eller fötter hamnar under tvättbänken vid höjning av skötbordet.

Måttet mellan bänk och skötbordsskiva skall vara **större än 100 mm!**

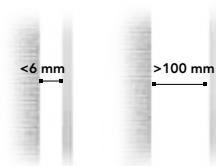




1. Justera bordet

Ställ bordet i våg genom att justera ställfötterna. Placera bordet mot väggen.


 Bordet skall stå mot golv. Det får ej 'hänga' på väggen!

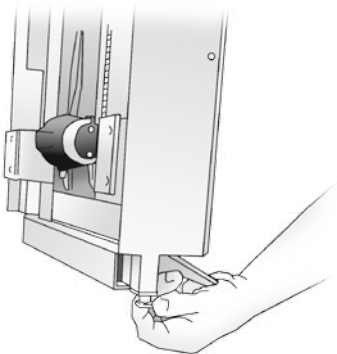

2. Skruva fast bordet – övre fästpunkter

Lossa täckpluggarna i stativets överkant.

Skruva fast bordet i väggen med kraftig fransk bult alternativt mot monteringskonsol och återplacera täckpluggarna

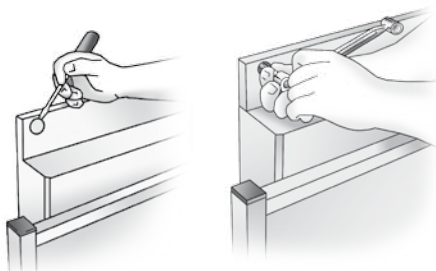



3. Montera elektronikbox



Montera skötbordets elektronikbox på lämpligt sätt (mot vägg eller på hylla) så att den är möjlig att ansluta till vägguttag samt tillse att styrkabel når skötbordet.

OBS! Styrkabeln skall vara tillräckligt lång så att den kan följa skötbordet upp och ner!




⚠ TÄNK PÅ: Om vägguttaget skall sitta i vått utrymme måste det föregås av jordfelsbrytare.

I vått utrymme får elektronikboxen EJ sitta inom område 0-2 enligt skiss.


Badkar

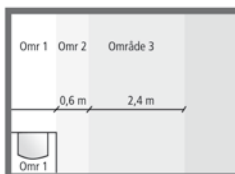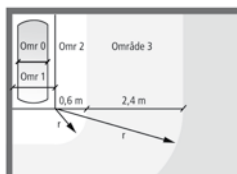

Dusch

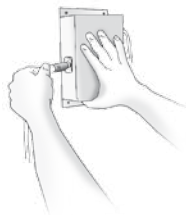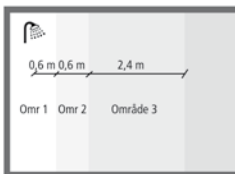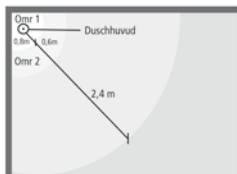

Anslut handkontrollen till elektronikboxen.

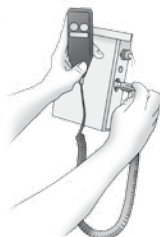


Anslut styrkabel mellan skötbord och elektronikbox.



4. Skruva fast bordet - nedre fästpunkter


Kör upp skötbordet så att bordets nedre fästöron blir synliga.


Skruva fast bordet i väggen med kraftig fransk bult alternativt mot monteringskonsol.

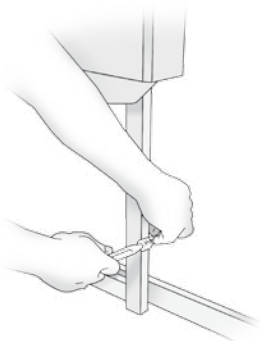

5. Kontrollera klämskyddets funktion

MULTI Skötbord är utrustat med klämskydd som skall stoppa bordet om något kommer i vägen vid nerfart. Kontrollera klämskyddets funktion genom att köra bordet neråt och samtidigt trycka upp klämskyddet. Bordet skall nu stanna!

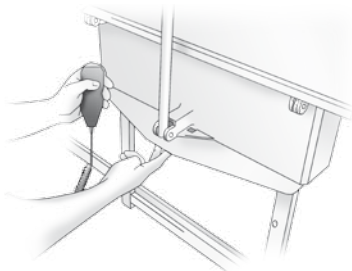


 Om klämskyddet ej fungerar ta bordet ur drift och tillkalla reparatör




Bruksanvisning

Vid användning fälls skötbordets skiva ut i horisontellt läge. När bordet ej används fälls skivan upp mot skötbordets stativ. Bordet hålls på plats i uppfällt läge med hjälp av gasfjäder – behöver därför ej låsas i uppfällt läge.

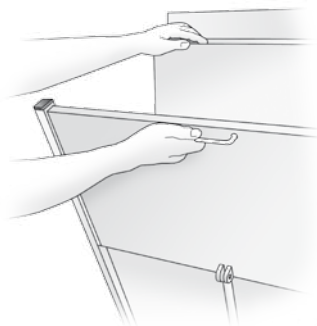

Kör bordet upp eller ner genom att trycka på handkontrollens UPP resp NER knapp. Bordet kör så länge knappen hålls nedtryckt. Bordets lägsta höjd är ca 30 cm och högsta höjd ca 100 cm.

⚠ När bordet ej används skall handkontrollen placeras så högt att barn ej kan komma åt kontrollen!

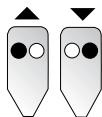

⚠ MAX BELASTNING = 40 kg

⚠ HA TILLSYN ÖVER BARNET NÄR BORDET KÖRS UPP ELLER NER!

⚠ LÄMNA EJ BARNET PÅ BORDET UTAN TILLSYN !!



Skötselanvisning

1. Normal rengöring


- Skötbordets lackerade metalledar kan rengöras med fuktig trasa. Normalt förekommande rengörings- och desinfektionsmedel kan användas.
- Skötbordets dyna kan rengöras med fuktig trasa. Normalt förekommande rengörings- och desinfektionsmedel kan användas.

2. Smörjning

- Om bordet visar en tendens att gå långsammare eller att det uppstår gnisslande ljud vid användning, skall stativets gejdrar behandlas med ex vis vaselin eller liknande smörjmedel. Kör upp bordet i högsta läget och påför smörjmedel på stativets vertikala gejdrar.

3. Kvartalsvis tillsyn

- Kontrollera att kabel från transformatorn är oskadd och att den löper fritt.
- Kontrollera att manöverdonets kabel är oskadd och att den löper fritt.
- Kontrollera bordets undre klämskydd genom att köra upp bordet i högsta läge. Kontrollera att den 'trekantiga' klämskyddsplåten löper fritt. Testa funktionen genom att köra bordet nedåt och manuellt påverka klämskyddet. Motorn skall stanna då klämskyddet aktiveras.

 Om klämskyddet EJ fungerar skall bordet tas ur drift och reparatör tillkallas!!

4. Årlig tillsyn

- Kontrollera bordets infästning i väggen. Får EJ finnas tendens till att det lossnat i infästningspunkterna.
- Kontrollera skötbordsskivans infästningar samt infästningar för fällmekanism och gasfjäder.



Vår erfarenhet - din trygghet

Comfort System har sedan starten 1987 haft i stort sett samma ägarstruktur och verkat under samma namn – ett faktum som idag är närmast unikt i branschen! Vår långa erfarenhet och kunskap kring vårt produktsortiment, gör att du som kund kan känna trygghet i ditt val av leverantör.



ComfortSystem
- vår erfarenhet din trygghet