



# Instruktioner för användare av Sängryggstöd

COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller skumgummimadrass i kombination med en bäddmadrass. Comfortabel Sängryggstöd uppfyller kraven enligt sängnorm EN 1970 och är avsedd för personer äldre än 12 år.





# 1. Monteringsanvisning

## 1.1 Leveransomfattning

**COMFORTABEL Sängryggstöd är packat i en kartong som innehåller:**

- Mekanik för sängryggstöd
- Motor
- Handkontroll
- Transformator
- Fixeringslapp (tillbehör)

Totalvikt ca 12 kg



**Fixeringslapp** (se separat monteringsinstruktion)

## 1.2 Uppackning

För att underlätta packning på fabrik är motorn i transportläge. Det innebär att motorns bakre fäste EJ är monterat på sängryggstödet.

- Packa upp sängryggstödet ur kartongen och ställ det på golvet enligt **bild 1**.
- Vrid motorn 90 grader och montera det L-formade motorfästet i motorns bakre fäste. Använd bifogad motorbult och säkra den med den sk Hårnålsprinten enl. **bild 2**. Montera och skruva sedan fast det L-formade fästet på ryggstödet 4-kantstapp.

Använd bifogad Stjärnratt och bricka montera enl. **bild 6 och 7**.



Kontrollera att motorhuset pekar nedåt enligt **bild 10**.

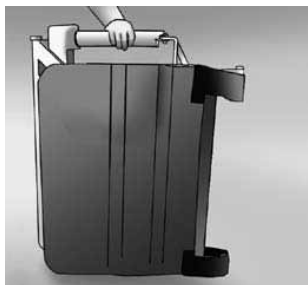


Bild 1.

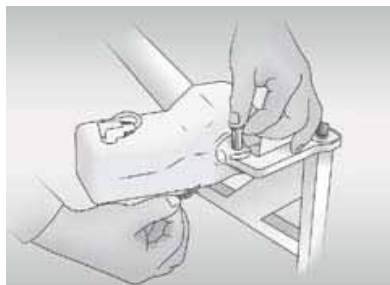


Bild 2.

### 1.3 Montering på säng

COMFORTABEL Sängryggstöd kan monteras med motorn på höger eller vänster sida. Om motorn efter upppackning är på rätt sida så fortsätt monteringen (enligt nedan). Är motorn på fel sida – gå till punkt 5.

- Placera sängryggstödet centralt på sängen enligt **bild 3**.
- Sängryggstödet skall placeras runt sängen enligt **bild 4**.
- Dra åt spännbanden så hårt som möjligt enligt **bild 5**.



– Kontrollera att sängryggstödet ligger stabilt på sängen.



– Kontrollera att spännbanden är åtdragna.



Bild 3.



Bild 4.

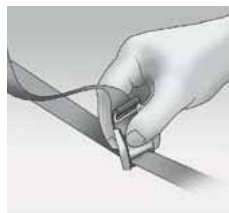



Bild 5.



#### 1.4 Anslutning av transformator och handkontroll

- Kontrollera att handkontrollen är ansluten till motorn.
- Anslut nätkabeln till vägguttaget.

**OBS! Schematisk bild. Transformatorn sitter monterad på motorn!**

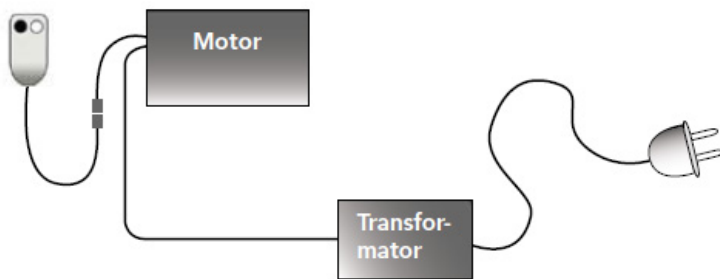

#### 1.5 Anpassning till höger/vänster

Sängryggstödet motor kan placeras på höger eller vänster sida genom att "vända runt" sängryggstödet enligt följande:

- Placera sängryggstödet på golvet enligt **bild 1**.
- Skruva av ratten på det bakre motorfästet enligt **bild 6 och 7**.
- Lyft upp och lossa det bakre motorfästet enligt **bild 7**.
- Vrid runt sängryggstödet 360 grader (den klädda delen) enligt **bild 8**.
- Vrid motorn 180 grader så att motorhuset pekar nedåt enligt **bild 9 och bild 10**. Kontrollera att motorn efter montering sitter som på **bild 10!**
- Återplacera det bakre motorfästet enligt **bild 9**.
- Skruva fast ratten på det bakre motorfästet enligt **bild 6 och 7**.

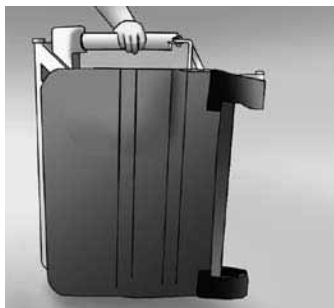


Bild 1.

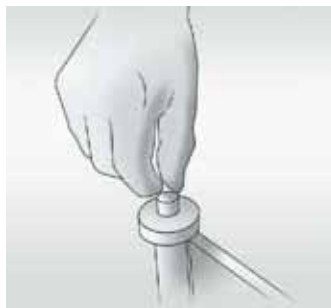


Bild 6.



Bild 7.

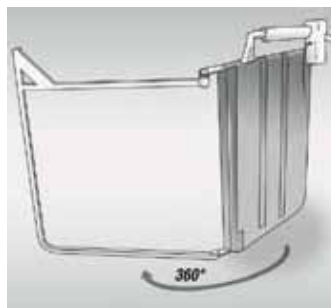


Bild 8.



Bild 9.



Bild 10.



## 2. Bruksanvisning

### 2.1 Strömförsörjning

Sängryggstödet drivs med hjälp av en lågvoltsmotor (24V) och strömförsörjs av en i systemet inbyggd transformator.



– Nätkabeln måste vara ansluten till vägguttaget.



– Kontrollera att nätsladden inte ligger i kläm eller fastnar i sängryggstödet.

### 2.2 Reglering av sängryggstödet

Sängryggstödet styrs från handkontrollen.

Knappar för UPP och NER enligt skiss.



- Maximal belastning på sängryggstödet = 70 kg. (Brukarvikt cs 145 kg).
- Kontrollera att sängryggstödet har fri plats för att kunna fälla uppåt/framåt.
- Kontrollera att ingenting befinner sig bakom/under sängryggstödet när det fälls nedåt/bakåt.

## 3. Skötselanvisning

COMFORTABEL sängryggstöd kräver minimal skötsel. Beroende på miljö och användningsområde kan dock visst underhåll krävas.

### 3.1 Normal rengöring

- Sängryggstödet rengörs med fuktig trasa. Normalt förekommande rengöringsmedel och desinfektionsmedel kan användas.
- Sängryggstödet överdrag kan tvättas i maskin, max 60 grader.

### 3.2 Smörjning

- Sängryggstödet behöver normalt ej smörjas. Vid behov kan ryggstödet leder smörjas.

### 3.3 Årlig tillsyn

- Kontrollera att nätkabel och kabel till handkontroll är oskadda.
- Kontrollera att spännbanden är oskadda.



## 4. Felsökning

### A. Sängryggstödet fungerar inte alls

- Kontrollera att nätsladden är ansluten till vägguttaget.
- Kontrollera att handkontrollen är ansluten till motorn.
- Kontrollera att motorn är anslutna till transformatorn.

Om felet kvarstår – kontakta leverantören.

### B. Sängryggstödet fungerar ibland

- Kontrollera att handkontrollen är ordentligt ansluten till motorn.
- Kontrollera att motorn är ansluten till transformatorn.

Om felet kvarstår – kontakta leverantören.



## Vår erfarenhet - din trygghet

Comfort System har sedan starten 1987 haft i stort sett samma ägarstruktur och verkat under samma namn – ett faktum som idag är närmast unikt i branschen! Vår långa erfarenhet och kunskap kring vårt produktsortiment, gör att du som kund kan känna trygghet i ditt val av leverantör.



**ComfortSystem**  
*- vår erfarenhet din trygghet*