



INSTRUKTION

LÅSBAR SKÖTERSKEPANEL Art nr: 952737



- Se att sköterskepanel är kopplad till sängens elektronikbox och att elektronikboxen har ström via nätsladden.
- Tryck in nyckel knappen
- Tryck sedan på den knapp där funktion visas, håll fortfarande inne nyckelknapp. Släpp båda knapparna.
- Nu skall lampan lysa på funktionsknappen och funktionen är låst. Går ej att använda funktion på manöverdon eller sköterskepanel när funktionsknapp lyser.
- För att låsa upp funktion, gör som ovan så att funktionsknappen slocknar.

- Det går att använda sköterskepanel som manöverdon.
- Håll inne funktionsknapp (skall vara släckt) och tryck på en av pilknapparna. Går att köra funktionen upp och ner.