

FloorBed Quick Guide

Läs alltid produktens bruksanvisning innan produkten tas i bruk!

Innan användning:


Figur 1: Säkerställ att sängens strömkabel är korrekt ansluten, och att "Power On" indikatorn lyser grönt på transformatorn i vägguttaget.

Figur 2: Säkerställ att sängens handkontroll är korrekt ansluten och att "Power On" lyser grönt.


Figur 3: Handkontrollen har en låsfunktion med tillhörande säkerhetsnyckel. Slep med nyckeln över handkontrollens nedre del enligt Figur 3, samt antal gånger enligt tabell nedan för korrekt användning.

Vid upplåsning av Trendelenburg-funktionen, avaktiveras funktionen automatiskt efter 45 sekunder.


FIGUR 1
FloorBed transformator
Power On Indikator (1)

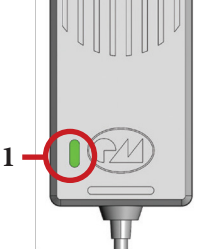

FIGUR 2
FloorBed Handkontroll
Power On Indikator (2)

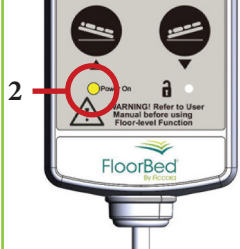

FIGUR 3
FloorBed Handkontroll

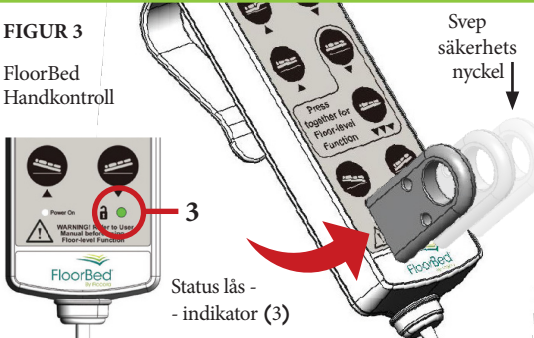

Slep	Indikator	Funktion
	○	LÅST
1 gång	●	Upplåst standard
2 gånger	●	Upplåst standard inkl. Trendelenburg
3 gånger	○	LÅST

Reglering av ryggstöd, UPP & NER

Reglering av bendel, UPP & NER

Reglering av sängens höjd, UPP & NER

Säkerhetsknapp för golvlägesfunktion, hålls in samtidigt som sänghöjd NER för att nå sängens lägsta läge.

Reglering av Trendelenburg / Omvänd Trendelenburg

