

Stötfångare för huvud- och fotände på FloorBed 2

Bruksanvisning

(Stötfångarna har ficka för handenheten)

IFU-FL2-005SV Rev 01

Innehåll

Titel	Sida
Välkommen	2
Allmänna varningar	3
1. Säkerhetsanvisningar	3
2. Avsedd användning	3
3. Tekniska specifikationer	4
4. Placering	4
5. Montering	4
6. Passar till barnpatienter	6
7. Montering av sidoräcken	6
8. Funktionskontroll	6
9. Rengöring och desinfektion	7
10. Förvaring	7
11. Garanti	7
12. Avfallshantering	7
13. Symboler	7
14. Kontaktuppgifter	7

Translated from IFU-FL1-005EN Rev 01

Välkommen

Hej!

Tack för att du har köpt en hälsovårdsprodukt från Accora. Innan du använder det här tillbehöret ska du läsa och förstå alla anvisningar i den här bruksanvisningen. All hantering av tillbehöret måste utföras enligt anvisningarna i bruksanvisningen.

Se till att bruksanvisningen finns tillgänglig för användare och operatörer under hela tillbehörets livslängd.

Om du behöver ytterligare information är du välkommen att kontakta oss. Se avsnitt 14 för regionspecifika kontaktuppgifter.

Denna bruksanvisning gäller för stötfångare för huvud- och fotände på FloorBed 2.

Innan du börjar använda tillbehöret ska du läsa denna bruksanvisning noga. All hantering av stötfångarna ska utföras enligt anvisningarna i bruksanvisningen.

All hantering som inte utförs enligt bruksanvisningen sker på egen risk och Accora tar inget ansvar för eventuella person- eller egendomsskador. Se till att bruksanvisningen alltid finns tillgänglig för användare av fot- och huvudändarnas stötfångare.

Stötfångarna för huvud- och fotändarna på FloorBed 2 bör kontrolleras regelbundet av vårdaren/användaren för att säkerställa att installationen är korrekt och att den fungerar som avsett.

Designpolicy och upphovsrätt

® och ™ är varumärken som tillhör Accora Ltd om inget annat anges. Eftersom vår policy är att ständigt förbättra oss förbehåller vi oss rätten att ändra produkter utan föregående meddelande. © Accora Ltd 2021.

ALLMÄNNA VARNINGAR!

1. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.
2. Dessa anvisningar måste följas för att garantera en säker och effektiv användning av stötfångarna samt säkerheten för användare, vårdgivare och omgivningen.
3. Stötfångarna måste monteras, placeras och användas enligt dessa instruktioner.
4. Säkerhetsanvisningarna för användning av stötfångarna och bruksanvisningen måste följas noga.
5. Stötfångarna får inte utsättas för rök, öppen eld, extrema temperaturer, brandfarliga gaser eller andra farliga ämnen eller situationer.
6. Accora kan inte hållas ansvarigt för person- eller egendomsskador eller olyckor som uppstår till följd av otillåtna förändringar, reservdelar som inte är original, försumlighet eller användning som inte följer den här bruksanvisningen.
7. Flytta inte sängen genom att dra i eller trycka på stötfångarna i huvud- eller fotänden.
8. Dessa stötfångare får inte förändras eller modifieras.
9. Patienter eller användare bör riskbedömas för att säkerställa att de kan förstå denna bruksanvisning och använda stötfångarna på ett säkert sätt utan risk för sig själva eller andra.

1. Säkerhetsanvisningar

1. Innan du använder stötfångarna ska du läsa bruksanvisningen och använda anordningen enligt beskrivningen i den.
2. Användaren bör förstå funktionen hos fot- och huvudändarnas stötfångare innan de monteras på sängen.
3. Använd inte fot- och huvudändarnas stötfångare om de är skadade eller defekta. Det kan leda till personskador.
4. En riskbedömning måste utföras innan sängen används av en patient.
5. Vid byte av delar får endast originaldelar och -material användas.

2. Avsedd användning

Efter en riskbedömning kan stötfångarna monteras på de sängar som listas nedan för att underhålla, förbättra, kompensera eller lindra patientens tillstånd. De ger skydd och minskar risken för skador.

Beskrivning	Användargrupp
FloorBed 2 NSB-0-FL2-200	Vuxna patienter Min. 146 cm lång
FloorBed 2 Junior omfattar FloorBed 2 NSB-0-FL2-200 + Stötfångare för huvud- och fotgavel BMHNE-0-FL4-500 + Säkerhetsomslag SLE-0-FL4-100 + Skyddsskenor PROPL-0-FL4-500	Barnpatienter Min. 75 cm lång Max. 155 cm lång

När stötfångarna har monterats med säkerhetsomslaget och skyddsskenorna, enligt respektive bruksanvisning, är sängen lämplig för barn enligt vad tabellen ovan visar.

Det är viktigt att du rådgör med Accora i förväg om du vill använda sängen för annat ändamål än det som beskrivs i denna bruksanvisning.

3. Teknisk specifikation

Beskrivning	Värde
Artikelnummer	BMHNE-0-FL4-500
Mått	900 x 800 x 100 mm 37 x 32 x 4 tum
Passar säng	FloorBed 2
Kompatibilitet	NSB-0-FL2-200
Vikt	3,5 kg/10 lbs

4. Placering

VARNING!

Stötfångarna måste monteras med hänsyn till bästa praxis enligt beskrivningen nedan. Om så inte görs kan det leda till klämning och allvarliga personskador.

Stötfångarna ska placeras så att insidan av sängens huvud- och fotändar täcks av de helt vadderade sidorna enligt bilden nedan.



5. Montering

VARNING!

Monteringen **MÅSTE** utföras av en behörig person.

Alla funktioner **MÅSTE** testas och godkännas av en behörig person efter montering.


Montering **MÅSTE** ske på en ren, ostörd plats och barn och husdjur ska hållas på avstånd.

Stötdämparna får inte monteras när en patient ligger i sängen.

1. Kontrollera att leveransen är komplett och oskadad. Enheten får inte användas om en skada har uppstått. Du ska ha fått:
 - a. Stötfångare för huvudändan.
 - b. Stötfångare för fotändan.
 - c. 4 x M6 x 35 mm anslutningsbult och mutter enligt bilden nedan.




2. Ta bort madrassen från sängen om den är monterad.
3. Ta bort stiften och R-klämmorna som håller madrassplattformen på sängens huvud- och fotända enligt bilden nedan.


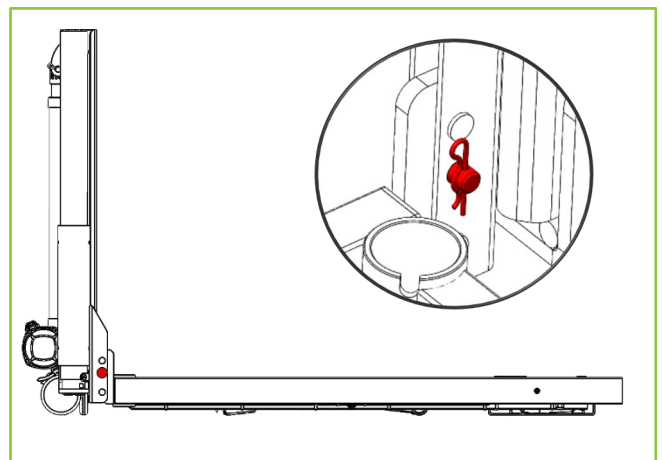


4. Montera de nya anslutningsbultarna och muttrarna i stället för stiften och R-klämmorna. Dra åt ordentligt.


5. Dra ner stötfångaren över huvudgaveln och se till att huvudgavelns insida täcks av stötfångarens vadderade sida, och att det dragkedjeförsedda facket sitter på huvudändans utsida.

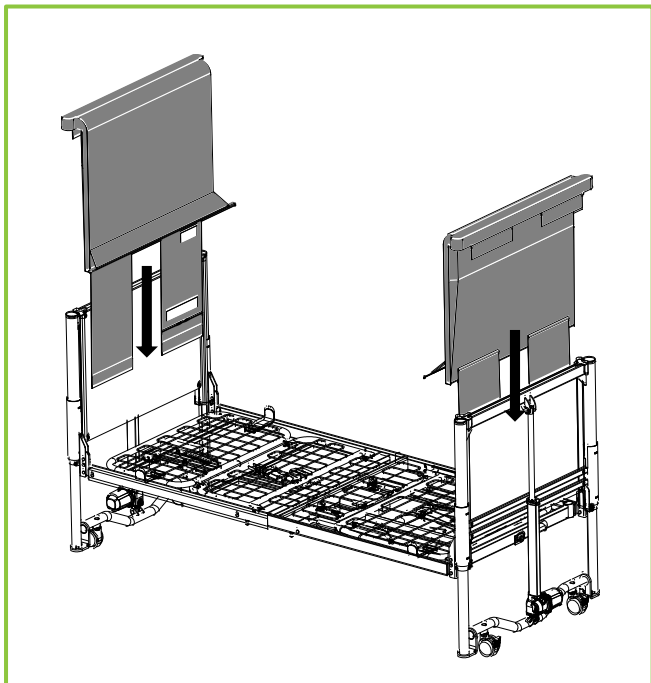


6. Under stötfångaren finns två metallflikar (1). Vid montering av stötfångaren måste dessa placeras i skåran på huvud- och fotgavlarna (2).

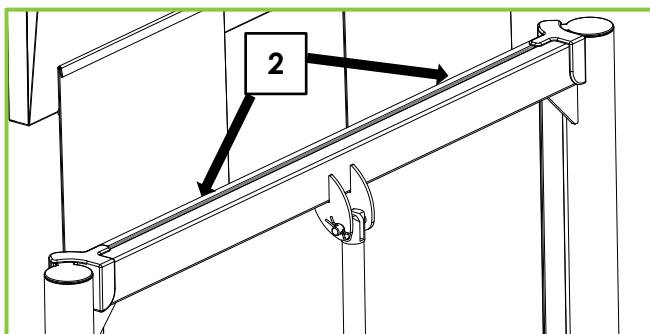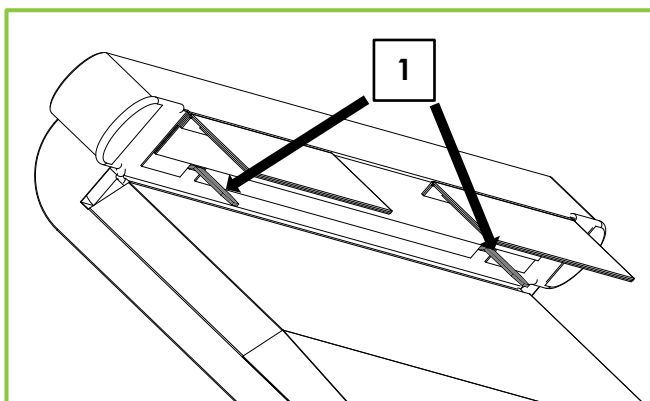


7. Kontrollera att flikarna är korrekt placerade och att stötfångaren sitter rakt på ovansidan av huvudgaveln. Vik upp varje flik (3) och fäst kardborrebandet under den lilla fliken längst upp på huvudgaveln (4).

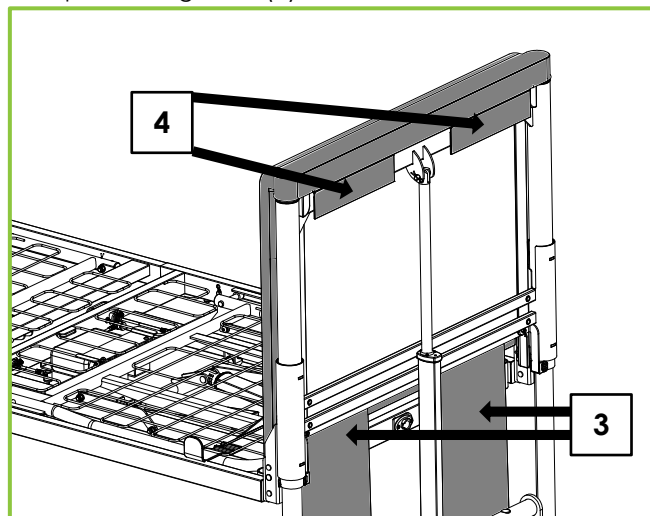

8. Upprepa steg 5-7 för sängens fotände.

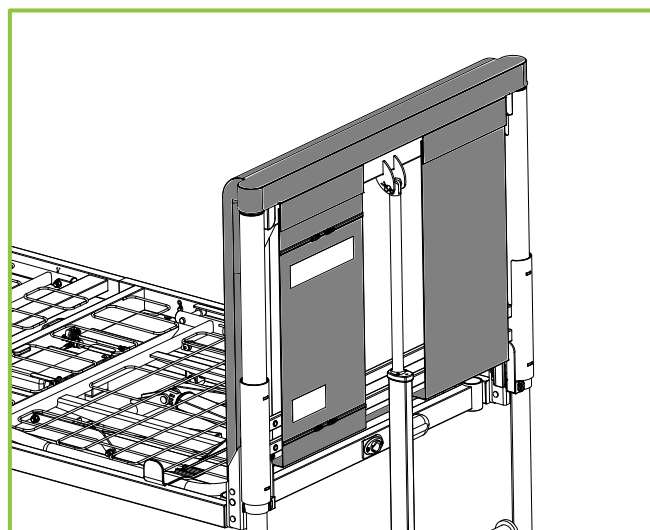


9. Om sängen ska användas med ett säkerhetsomslag ska du observera att säkerhetsomslaget inte är fäst på stötfångaren.
10. Säng med stötfångare.

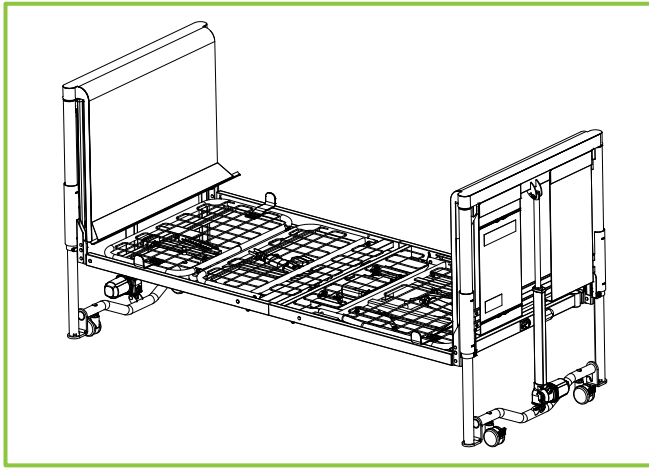

6. Passar till barnpatienter

Om sängen anpassas för en barnpatient ska följande åtgärder vidtas, utöver de som beskrivs ovan, för att sängen ska vara lämplig för användning av barn.

1. Kontrollera att skyddsomslaget och stötfångarna är korrekt monterade enligt respektive bruksanvisning.
2. Leta upp handenhetens kabel där den kommer ut ur säkerhetsomslaget vid sängens huvudände.
3. Stötfångaren har en ficka med dragkedja upp till och ned till. Det finns ett horisontellt kardborreband inuti fickan.
4. För in handenheten genom det nedre hålet i fickan. Dela det invändiga kardborrebandet och för handenheten genom fickan och ut ur fickans övre del enligt bilden.
5. Dra handenheten genom fickan så långt det går. Stäng den nedre dragkedjan mot handenhetens kabel och tryck ihop det invändiga kardborrebandet mot handenheten.

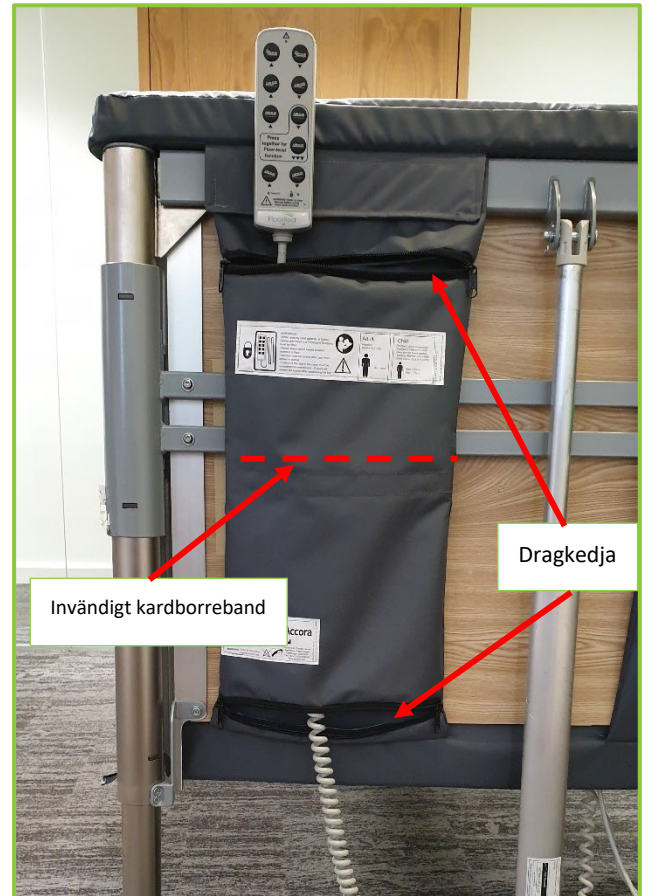

6. Om det är nödvändigt att låsa in handenheten när den inte används ska den låsas (se relevant sänghandbok för information om hur) och placeras i fickans övre del. Dragkedjans löpare förs sedan ihop och det medföljande hänglåset kan användas för att låsa ihop de två löparna. (När hänglåset är olåst ska det förvaras på en säker plats utom räckhåll för barn.)

7. Montering av sidoräcken (vid behov)

1. Om sidoräckena ska användas på sängen måste de monteras efter att skyddsomslaget och stötfångarna har monterats.
2. Se bruksanvisningen för sidoräckena för fullständiga monteringsanvisningar.

8. Funktionskontroll

VARNING!

Monteringen **MÅSTE** utföras av en behörig person.

Alla sängfunktioner **MÅSTE** testas och godkännas av en behörig person efter montering.

Funktionskontrollen får inte utföras när sängen används.

Utför följande sängfunktioner och kontrollera om det förekommer oväntade ljud eller rörelser:

1. Höj och sänk sängen
2. Höj och sänk ryggstödet
3. Höj och sänk benstödet
4. Höj och sänk sidoräcken (om sådana monterats)

9. Rengöring och desinfektion

VARNING!

Rengöring och desinfektion **MÅSTE** utföras av en behörig person.

Alla funktioner **MÅSTE** testas och godkännas av en behörig person efter rengöring eller desinfektion.

Fot- och huvudändarnas stötfångare **MÅSTE** rengöras och desinficeras innan sängen återanvänds för en annan patient.

Använd endast rengöringsmedel som är avsett för användning inom sjukvården för att desinficera fot- och huvudändarnas stötfångare. Använd inte slipmedel, stålull eller annat som kan skada materialet. Använd inte frätande eller etsande ämnen eller starka syror.

Använd inte produkter som kan förändra plastens struktur eller beteende (bensin etc.).

10. Förvaring

För problemfri förvaring rekommenderar vi:

1. Fot- och huvudändarnas stötfångare ska förvaras i en temperatur mellan -20 °C och +50 °C (-4 °F och +122 °F).
2. Stötfångarna bör förvaras i en relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) mellan 30 och 75.

11. Garanti

Modellnummer	BMHNE-0-FL4-500
Garantitid	2 år

12. Avfallshantering

Vid kassering av fot- och huvudändarnas stötfångare ska uttjänta delar kasseras i enlighet med gällande miljöbestämmelser.

13. Symboler

	Varning, se upp för potentiell fara - se bruksanvisningen
	Se bruksanvisningen
	Modellnummer
	Batchnummer
	Tillverkningsdatum
	Tillverkare
	Får ej strykas
	Får ej torktumlas
	Får ej blekas
	Torka av
	Låsbar förvaringsplats för handenheter
	Patientens längd (vuxen)
	Patientens längd (barn)

14. Kontaktuppgifter

Adress	Accora Ltd. Charter House Barrington Road, Orwell Cambridge, SG8 5QP, Storbritannien
Telefon	+44 (0)1 223 206 100
E-post	info@accora.care
Webbplats	www.accora.care

Accora



Accora
Barrington Road
Orwell
Cambridge
SG8 5QP
Storbritannien

T: +44 (0)1 223 206 100
info@accora.care
www.accora.care