

## **Rengöring och desinfektion av Floorbed 2, art.nr NSB-0-FL2-200**

### **VARNING**

Rengöring och desinfektion SKALL utföras av en person med behörighet.

Sängen måste kopplas bort från strömförsörjningen när den rengörs eller desinficeras.

Alla funktioner SKALL testas och godkännas av en behörig person efter rengöring eller desinfektion. Sängen MÅSTE rengöras och desinficeras innan sängen återanvänds av en annan patient

### **Rengöringsinformation:**

För att desinficera sängen, använd endast rengöringsmedel som är avsedda för användning inom hälso- och sjukvården. Använd inte slipmedel, rengöringsmedel eller andra material som kan skada beläggningen. Använd inte frätande ämnen, frätande medel eller starka syror.

Använd inte rengöringsmedel som kan ändra plastens struktur eller beteende (bensin etc.).

Rengör genom att försiktigt torka med en fuktig trasa. Sängen är inte avsedd för underhåll i automatiska sängtvättar eller för rengöring med tryckvatten, sprutning, dusch eller ångrengöring.

Accora kan inte hållas ansvarigt för skador eller risk för skador om olämplig rengörings- eller desinfektionsmedel används.

### **Rengöringsprocedur:**

1. Ta bort alla tillbehör, madrass etc.
2. Justera madrassplattformen till det högsta läget och justera ryggstödet och fotstödet läge för att ge åtkomst till rengöring av alla plattformsdelar.
3. Koppla bort sängen från strömförsörjningen.
4. Flytta sängen dit rengöringen ska ske och lås sänghjulen.
5. Rengör enligt beskrivningen i "Rengöringsinformation".