



Besiktningsprotokoll

för ComfortSystems sängsortiment

ID nr. sänglyft:	Adress:
ID nr. sängbotten:	Avd:
Komplett besiktning EJ utförd ☐ Pga.:	Rum:
Besiktning/smörjning utförd enl. protokoll av:	Datum:

Besikta säng kontinuerligt för ökad säkerhet, högre prestanda, längre livslängd och bättre totalekonomi.

Punkter med är en påminnelse för smörjning. är WD40 – Spray grease och är Wurth HHS 200 (rekommendation från ComfortSystem) Efter smörjning, torka bort överflödigt fett. **O.B.S!** Undvik spill av smörjmedel på golv och kringliggande miljö, "halkrisk".

KONTROLLERA FÖLJANDE PUNKTER

1. ELEKTRONIK		Utan anmärkning	Anmärkning	Smörjning utförd
1. Kablar/Kontakter är oskadda och rätt anslutna				
1.1	Ryggmotor	☐	☐	
1.2	Fotmotor	☐	☐	
1.3	Lyftmotor	☐	☐	
1.4	Manöverdon	☐	☐	
1.5	Elektronik (kontrollera även att grön kontrollampa lyser)	☐	☐	
2. SÄNGLYFT				
2.1	Sänglyftens arbetsområde, ca 50 cm mellan högsta-/lägsta-läge.	☐	☐	
2.2	Synliga skador på mekaniken. Onaturliga glapp på infästningar/leder.	☐	☐	
2.3	Slitage/glapp/skador på hjul eller dess infästning. Låsning fungerar tillfredställande.	☐	☐	☐
2.4	Synliga skador på lyftmotor. Infästningspunkter, sprintar/låsningar är intakta och säkrade.	☐	☐	☐
2.5	Rengör och smörj lager/lagerbanor.	☐	☐	☐
3. SÄNGBOTTEN				
3.1	Synliga skador på sängbottens mekanik.	☐	☐	
3.2	Trä/alu lator och infästning oskadd och sitter på plats.	☐	☐	
3.3	Sängbottens madrassstopp och skruvar åtdragna i fotmadrassstopp.	☐	☐	
3.4	Infästningar för rygg-/lårdel är oskadd och ej onaturliga glapp.	☐	☐	☐
3.5	Leder/plastgångjärn är oskadda och sprintar/låsning är intakt.	☐	☐	☐
3.6	Synliga skador på ryggmotor. Infästningspunkter, sprintar/låsningar är intakta och säkrade.	☐	☐	☐
3.7	Synliga skador på fotmotor. Infästningspunkter, sprintar/låsningar är intakta och säkrade.	☐	☐	☐
3.8	Ryggdel går upp i ca 70 grader, högsta-/lägsta-läge.	☐	☐	
3.9	Fotdelen kan köras till högsta-/lägsta-läge.	☐	☐	
3.10	Kontrollera manöverdosans alla funktioner.	☐	☐	



KONTROLLERA FÖLJANDE PUNKTER

4. SÄNGRAM		Utan anmärkning	Anmärkning	Smörjning utförd
4.1	Synliga skador på sängram.	☐	☐	
4.2	Dra åt skruv vid behov som håller gavlar och ev. fast långsida, lagom tryck. O.B.S! Skruvar i grindbommar får EJ röras pga. gänglåsning.	☐	☐	
4.3	Grinden löper lätt. Smörj samtliga ytor i gavlarnas spår. 	☐	☐	☐
4.4	Grinden låser på säkert sätt (belastningstest ovanifrån ca 20-30 kg).	☐	☐	

[illegible]

Säng GODKÄND ☐	Datum	Signatur
---------------------------------------	-------	----------

Säng UTDÖMD ☐	Beskrivning	Datum	Signatur



ComfortSystem